

Prueba de Glifosato - Agua

Contenido del Kit de Prueba

Comience por identificar estos ocho elementos de su kit de prueba.

Caja del Kit de Prueba	Formulario de Solicitud de Prueba
Vaso Recolector	Bolsa Transparente con Cierre Hermético para Material Biológico
Paquete de Hielo	Hoja Absorbente de Embalaje
Bolsa Térmica Plateada	Paquete de Laboratorio para Envío

Preparación para su Prueba

- Por favor lea todas las instrucciones detenidamente.
- Coloque el paquete de hielo de forma plana en su congelador, así estará listo para enviar con su muestra.
- Localice y complete la hoja de códigos de barras en su kit de prueba. Coloque una etiqueta de código de barras en cada muestra recolectada. Asegúrese de que la información sea legible e incluya la fecha y hora de la recolección, y que el nombre coincida con lo proporcionado en la orden de prueba.
- Determine qué grifo servirá como fuente de su muestra de agua (preferiblemente donde obtiene su agua potable).

Para envíos dentro de los Estados Unidos:

Recolecte su muestra de agua de lunes a jueves, es importante para que la muestra llegue a nuestro laboratorio antes del fin de semana.

Para envíos fuera de los Estados Unidos:

Recolecte y envíe su muestra de agua un lunes o un martes.

Comencemos

1. Antes de recolectar agua, quite la tapa del vaso recolector y coloque cuidadosamente la tapa con el interior hacia arriba en una superficie limpia y seca. Trate de no tocar el interior del vaso o la tapa. No permita que el interior de la tapa entre en contacto con ninguna superficie.
2. Abra el grifo y deje correr el agua durante 30 segundos.
3. Coloque el recipiente en el flujo de agua para recolectar la muestra.
4. Llene el recipiente hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad. NO lo llene más que esto.
5. Después de la recolección de la muestra, enrosque firmemente la tapa.
6. Congele la muestra de agua durante un mínimo de 4 horas antes del envío. Mantenga en el congelador hasta estar listo para enviar.

Preparando la Muestra para el Envío

1. Asegúrese de que la etiqueta de código de barras en cada tubo recolector esté completada y coincida con la orden de prueba (o Formulario de Solicitud de Prueba).
2. Saque del congelador el vaso recolector congelado, el paquete de hielo congelado y cualquier vial para otras recolecciones, y verifique que las tapas estén bien cerradas.
3. Coloque todas las muestras congeladas y la hoja absorbente de embalaje dentro de la bolsa transparente con cierre hermético para material biológico y selle.
4. Coloque la bolsa transparente con cierre hermético sellada dentro de la bolsa térmica plateada junto con el paquete de hielo congelado y selle.
5. Coloque la bolsa térmica plateada llena dentro de la Caja del Kit de Prueba. Si está usando el Formulario de Solicitud de Prueba, colóquelo también en la caja. Cierre la tapa.
6. Localice la tarjeta de instrucciones de envío incluida en su kit de prueba para obtener detalles sobre cómo enviar su(s) recolección(es).



Asegúrate de que todas las muestras estén etiquetadas. Las muestras sin etiquetar serán rechazadas.

¿Qué sigue?

Los resultados de su prueba serán entregados a su médico o asesor de salud generalmente dentro de dos semanas después de haber sido recibidos en los laboratorios de Mosaic Diagnostics.

Será responsabilidad de su médico o asesor de salud revisar los resultados con usted, identificar cualquier área de interés o preocupación, y trabajar con usted para establecer los siguientes pasos apropiados.

¿Alguna pregunta?

Si tiene preguntas sobre cualquier aspecto de la recolección de la muestra o el proceso de envío, no dude en contactarnos:

Teléfono | Nuestro amable equipo de atención al cliente está disponible de lunes a viernes de 8 am a 5 pm CST al 800-288-0383

Email | CustomerService@MosaicDX.com

Para preguntas sobre los resultados de la prueba o sus implicaciones para tu salud, por favor hable con su médico o asesor de salud y bienestar. El personal de Mosaic Diagnostics no puede discutir directamente los resultados de las pruebas con los pacientes o sus familiares.