



MOSAIC™
DIAGNOSTICS
Formerly Great Plains Laboratory

Votre corps a quelque chose à vous dire

Voici comment nous l'écoutons

Instructions kit de
prélèvement microbiologique





Une fenêtre sur votre monde intérieur.

La médecine moderne est devenue de plus en plus attentive à l'impact des micro-organismes intestinaux sur notre bien-être. Même les praticiens les plus conventionnels reconnaissent le rôle de la flore intestinale amicale dans le maintien d'une vie saine et la résolution de nombreux problèmes.

Les échantillons doivent être expédiés le **lundi, le mardi ou le mercredi**¹. Si vous effectuez le prélèvement pendant le week-end, conservez l'échantillon jusqu'au lundi pour l'expédier.

¹ Si vous résidez hors des États-Unis d'Amérique, vous devriez effectuer votre prélèvement le lundi ou mardi afin d'avoir du temps supplémentaire pour l'envoyer.

Contenu du kit d'examen

Commencez par identifier ces huit éléments de votre kit d'examen.



*Boîte de kit
d'examen*



*Sac à fermeture éclair
transparent pour la protection
contre les risques biologiques*



*Flacon avec embout
jaune*



*Feuille d'emballage
absorbante*



*Plateau de
prélèvement*



*Paquet pour
expédition au
laboratoire*



Gants jetables



*Formulaire papier de
demande d'examen*

Gardez tous les composants hors de portée des animaux et des enfants.

Attention à ne pas renverser le liquide conservateur contenu dans les flacons et évitez tout contact avec votre peau et vos yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau et du savon. En cas d'ingestion accidentelle, contactez immédiatement votre médecin.

Avant le prélèvement

Important : n'interrompez pas un traitement sans avoir préalablement consulté votre médecin.

Si vous avez besoin d'un laxatif

Si vous avez des difficultés à prélever un échantillon de selles, vous pouvez utiliser un laxatif oral à base de phosphate de soude, de citrate de magnésium ou de fibres de psyllium 24 heures avant votre heure de prélèvement prévue. Vous pouvez aussi procéder à des lavements à l'aide d'eau distillée uniquement. Ne pas utiliser de suppositoires ou d'huiles minérales.


Veillez vous abstenir de prendre les produits suivants :

- Enzymes digestives, antiacides et aspirine ou autres AINS pendant les deux jours précédant le prélèvement.
- Suppléments probiotiques pendant deux semaines avant le prélèvement.
- Si vous prenez des médicaments antifongiques ou antibiotiques, attendez trois jours après le terme du traitement pour procéder au prélèvement.
- Ne pas prélever d'échantillons durant les menstruations ou en cas de saignement hémorroïdaire.

Commençons maintenant



Localisez et complétez l'étiquette à code-barres de votre kit d'examen. Placez l'étiquette à code-barres sur le flacon avec embout jaune. Assurez-vous que les informations sont lisibles et comprennent la date et l'heure de prélèvement, et que le nom correspond à celui fourni sur la demande d'examen.

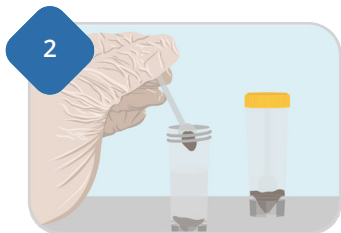

Ajoutez des morceaux de l'échantillon dans le flacon à embout jaune en utilisant la cuillère attachée au couvercle et en prenant des bouts sur différentes parties de l'échantillon jusqu'à atteindre la **ligne de remplissage**.



Fermez le flacon et agitez énergiquement pendant environ 30 secondes. Placez-le dans le réfrigérateur jusqu'à l'expédition.

Jetez les échantillons restants et le matériel de prélèvement. Ne jetez pas le plateau dans les toilettes.

Préparation du paquet

Assurez-vous que chaque échantillon a une étiquette à code-barres renseignée et que le nom correspond à celui fourni sur la demande d'examen.

1 **Regroupez le matériel d'emballage mis de côté.** Localisez le sac à fermeture éclair transparent, les échantillons prélevés et la feuille d'emballage absorbante.

2 **Placez le flacon à embout jaune** dans le sac à fermeture éclair transparent. Ajoutez la feuille absorbante, scellez le sac en utilisant la fermeture.



3

Placez le sac à fermeture éclair transparent dans la boîte du kit d'examen.



4

Si le formulaire de demande d'examen est utilisé, placez-le également dans la boîte. Fermez le couvercle. Consultez les instructions dans votre kit d'examen pour les détails sur l'expédition de vos prélèvements.

Quelle est la prochaine étape ?

Vos résultats d'examens seront communiqués à votre médecin ou praticien de santé généralement sous 2 ou 3 semaines après réception par Mosaic Diagnostics.

Votre médecin ou praticien a la responsabilité d'analyser les résultats avec vous, d'identifier toute question d'intérêt ou de préoccupation, et de mettre en place le suivi avec vous. Pour toute question sur les résultats de vos examens ou les impacts sur votre santé, veuillez vous adresser à votre médecin ou praticien de santé. Le personnel de Mosaic Diagnostics ne peut pas discuter des résultats d'examens directement avec les patients ou leurs familles.

Avez-vous des questions ?

Si vous avez des questions sur les prélèvements ou envois, n'hésitez pas à nous contacter :



Téléphone | notre aimable équipe service clients est disponible du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 (heure du Centre des États-Unis) au 800-288-0383



E-mail | CustomerService@MosaicDX.com



MOSAIC[™]
DIAGNOSTICS
Formerly Great Plains Laboratory