



MOSAIC
DIAGNOSTICS
Formerly Great Plains Laboratory

Test Microbiologique: Test Microbiologique Profil du Microbiome GI360™

Une fenêtre donnant sur votre monde intérieur.

La médecine moderne est devenue de plus en plus attentive à l'impact des micro-organismes intestinaux sur notre bien-être. Même les professionnels de santé les plus traditionnels reconnaissent le rôle d'une bonne flore intestinale dans le maintien d'une vie saine et son rôle par rapport à de nombreux problèmes.

Les échantillons doivent être expédiés **le lundi, le mardi ou le mercredi**¹. Si vous effectuez le prélèvement le week-end, conservez l'échantillon jusqu'au lundi pour l'expédition.

¹En dehors des États-Unis, l'échantillon doit être prélevé le lundi ou le mardi pour laisser plus de temps pour l'expédition.

Avant de Procéder au Prélèvement

Important: N'interrompez pas la prise de médicaments ou de compléments sans avoir consulté au préalable votre professionnel de santé.

Si vous avez besoin d'un laxatif:

Si vous avez des difficultés à produire un échantillon de selles, vous pouvez utiliser un laxatif oral à base de phosphate de sodium, de citrate de magnésium ou de fibres de psyllium 24 heures avant l'heure prévue du prélèvement. Les lavements peuvent être administrés uniquement avec de l'eau distillée. N'utilisez pas de suppositoires ou d'huile minérale.


Veillez vous abstenir de prendre ce qui suit:

- Enzymes digestives, antiacides et aspirine ou autres AINS pendant deux jours avant le prélèvement.
- Compléments probiotiques pendant deux semaines avant le prélèvement.
- Si vous prenez des antifongiques ou des antibiotiques, veuillez terminer le traitement, puis attendre trois jours avant de procéder au prélèvement.
- Ne prélevez pas d'échantillons pendant les règles ou en cas de saignement actif des hémorroïdes.



Contenu du Kit de Test

Commencez par identifier ces éléments de votre kit.

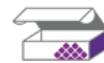

Boîte du kit de test



Flacon à bouchon jaune



Plateau de prélèvement



Gants jetables



Sac à fermeture à glissière transparent pour déchets biologiques dangereux



Pack d'expédition de laboratoire



Feuille d'emballage absorbante

Tenez tous les composants du kit à l'écart des animaux de compagnie et des enfants. Veillez à ne pas renverser le liquide conservateur dans le flacon et à éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, lavez soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'ingestion accidentelle, contactez immédiatement votre professionnel de santé.

Avez-vous des questions?

Si vous avez des questions sur un aspect quelconque du processus de prélèvement ou d'expédition des échantillons, n'hésitez pas à nous contacter:



Téléphone | Notre service clients est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h HNC au 800-288-0383



Email | CustomerService@MosaicDX.com

Passons à l'action

1



Localisez et remplissez la fiche à code-barres de votre kit de test.

Placez un autocollant à code-barres sur le flacon à bouchon jaune. Assurez-vous que les informations sont lisibles et incluent la date et l'heure de prélèvement, et que le nom correspond à ce qui a été fourni sur la commande de test.

2



Mettez un gant et recueillez l'échantillon dans le plateau de prélèvement.

Ne laissez pas de l'urine ou de l'eau entrer en contact avec l'échantillon.


3



Ajoutez des morceaux de votre échantillon dans le flacon à bouchon jaune à l'aide de la cuillère fixée au couvercle,

en prélevant des morceaux de différentes parties de l'échantillon jusqu'à ce que le mélange d'échantillon et de conservateur atteigne la ligne de remplissage.

4

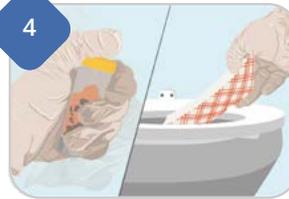

Fermez hermétiquement le flacon et agitez vigoureusement pendant environ 30 secondes.

Placez au réfrigérateur jusqu'à l'expédition. Éliminez l'échantillon restant et le matériel de prélèvement. Ne rincez pas le plateau.

Préparation du colis


1

Placez le flacon à bouchon jaune dans le sac à fermeture à glissière pour déchets biologiques dangereux. Ajoutez la feuille d'emballage absorbante et fermez hermétiquement à l'aide de la fermeture à glissière.



2

Remettez le sac à fermeture à glissière pour déchets biologiques dangereux fermé hermétiquement dans la boîte du kit de test et fermez le couvercle.

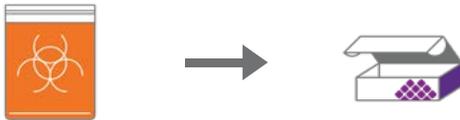

3

Localisez la carte d'instructions d'expédition incluse dans votre kit de test pour obtenir des détails sur l'expédition de votre prélèvement.

Quelle est l'étape suivante ?

Vos résultats de test seront communiqués à votre professionnel de santé dans les 2 à 3 semaines suivant la réception chez Mosaic Diagnostics.

Il reviendra à votre professionnel de santé d'examiner les résultats avec vous, d'identifier tout domaine d'intérêt ou de préoccupation et de travailler avec vous pour définir les étapes suivantes appropriées. Le personnel de Mosaic Diagnostics ne peut pas discuter des résultats de test directement avec les patients ou les membres de leur famille.

Rendez-vous sur [MosaicDX.com](https://www.mosaicdx.com) pour bénéficier de plus de ressources

(800) 288-0383 customerservice@mosaicdx.com
8400 W 110th Street, Suite 500, Overland Park, KS 66210,
États-Unis



Toutes les marques commerciales sont la propriété de la société et de ses filiales.
©2025 Mosaic Diagnostics. Tous droits réservés.

MDX-INST-MICROBIOLOGY-FRE 8-2025 v.1