



MOSAIC™
DIAGNOSTICS
Formerly Great Plains Laboratory

Il tuo corpo ha qualcosa da dirti

Ecco come lo ascoltiamo

Istruzioni del kit per il prelievo di campioni
per test microbiologico





Una finestra sul tuo mondo interno.

La medicina moderna è diventata sempre più attenta all'impatto dei microrganismi intestinali sul nostro benessere. Anche i professionisti più tradizionali riconoscono il ruolo della flora intestinale buona nel permetterci di mantenere una vita sana.

I campioni devono essere spediti il **lunedì, il martedì o il mercoledì**¹. Se si effettua il prelievo nel fine settimana, conservare il campione fino al lunedì per la spedizione.

¹Al di fuori degli Stati Uniti, il campione deve essere raccolto il lunedì o il martedì per lasciare più tempo per la spedizione.

Contenuto del kit del test

Cominciamo identificando questi otto elementi del kit del test.



Scatola del kit del test



Fiala con tappo giallo



Vassoio di raccolta



Guanti monouso



Busta trasparente con chiusura a zip per materiali a rischio biologico



Foglio di imballaggio assorbente



Busta per spedizione al laboratorio



Modulo di richiesta del test

Tieni tutti i componenti del kit lontano da animali domestici e bambini.

Fai attenzione a non versare il liquido conservante contenuto nelle fiale e a evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacqua abbondantemente con acqua per 15 minuti. In caso di contatto con la pelle, lava accuratamente con acqua e sapone. In caso di ingestione accidentale, contatta immediatamente il tuo medico.

Prima del prelievo

Importante: non interrompere l'assunzione di alcun farmaco o integratore senza prima consultare il tuo medico.

Qualora sia necessario un lassativo

Se hai difficoltà a produrre un campione di feci, puoi assumere un lassativo orale a base di sodio fosfato, magnesio citrato o fibra di psillio 24 ore prima dell'ora prevista per il prelievo. I clisteri possono essere somministrati solo con acqua distillata. Non usare supposte né olio minerale.


Evita l'assunzione dei seguenti farmaci:

- Enzimi digestivi, antiacidi, aspirina e altri FANS per i due giorni precedenti il prelievo.
- Integratori probiotici per le due settimane precedenti il prelievo.
- Se stai assumendo farmaci antimicotici o antibiotici, termina il ciclo di farmaci, quindi attendi tre giorni prima del prelievo.
- Non prelevare campioni durante le mestruazioni o in caso di emorragia da emorroidi in atto.

Cominciamo



Trova e compila la scheda con il codice a barre nel kit del test. Applica un adesivo con codice a barre sulla fiala con il tappo giallo. Accertati che le informazioni siano leggibili e includano la data e l'ora del prelievo e che il nome corrisponda a quello fornito nell'ordine del test.

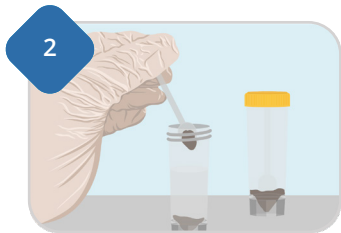

Inserisci dei frammenti di campione nella fiala con il tappo giallo, prelevandoli da diverse parti del campione con il cucchiaino attaccato al coperchio, fino a quando il campione e il conservante combinati non raggiungeranno **la linea di riempimento.**



Sigilla la fiala e agitala energicamente per circa 30 secondi. Metti la fiala nel frigorifero fino al momento della spedizione.

Smaltisci il campione residuo e i materiali utilizzati per il prelievo. Non gettare il vassoio nel gabinetto.

Preparazione del pacco

Accertati che ogni campione riporti l'adesivo con codice a barre compilato e che il nome corrisponda a quello fornito nell'ordine del test.

1

Recupera il materiale di imballaggio che avevi messo da parte.

Individua la busta trasparente con chiusura a zip per materiali a rischio biologico, tutti i campioni prelevati e il foglio di imballaggio assorbente.

2

Metti la fiala con il tappo giallo nella busta trasparente con chiusura a zip per materiali a rischio biologico. Aggiungi il foglio di imballaggio assorbente e sigilla utilizzando la chiusura a zip.



3

Metti la busta con chiusura a zip per materiali a rischio biologico sigillata nella scatola del kit del test.



4

Se hai usato il modulo di richiesta del test, inserisci anch'esso nella scatola del kit del test. Chiudi il coperchio. Consulta la scheda con le istruzioni per la spedizione inclusa nel kit del test per informazioni dettagliate su come spedire i campioni.

E adesso?

I risultati del test verranno consegnati al tuo medico o professionista sanitario generalmente entro 2-3 settimane dalla ricezione presso Mosaic Diagnostics.

Spetterà al tuo medico o professionista sanitario esaminare i risultati con te, identificare eventuali aree di interesse o preoccupazione e definire con te i passi successivi più appropriati. Per eventuali domande sui risultati dei test o sulle loro implicazioni per la salute, ti invitiamo a rivolgerti al tuo medico o professionista sanitario. Il personale di Mosaic Diagnostics non può discutere i risultati dei test direttamente con i pazienti o con i loro familiari.

Domande?

Se hai domande su qualunque aspetto della raccolta del campione o sulla procedura di spedizione, non esitare a contattarci:



Telefono | il nostro cordiale servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 CST al numero 800-288-0383



E-mail | CustomerService@MosaicDX.com



MOSAIC[™]
DIAGNOSTICS
Formerly Great Plains Laboratory