



MOSAIC™
DIAGNOSTICS
Formerly Great Plains Laboratory

あなたの身体が何かを
伝えようとしています

私たちはそこに耳を傾けます

微生物検査採取キット説明書





あなたの内なる世界への窓。

現代医学は、腸内細菌叢による健康への影響にますます注意を向けています。最も主流に属する医療従事者でさえ、健康的な生活の維持する善玉腸内細菌叢の役割や、他の多くの問題を認識しています。

検体は**月曜日、火曜日、水曜日**¹のみに発送する必要があります。週末に採取を完了した場合、試料を月曜日の発送まで保管してください。

¹米国以外では、配送に必要な時間を確保するため、月曜日または火曜日に検体を採取する必要があります。

検査キットの内容

まず、検査キットの8つの構成品を確認することから始めます。



検査キットボックス



ジップロック式の透明
バイオハザードバッグ



黄色いキャップの
バイアル



吸水性包装シート



採取トレイ



配送用検査パック



使い捨て手袋



検査依頼書

すべての内容物をペットやお子様手の届かない場所で保管してください。バイアルの保存液をこぼさないように注意し、肌や目に触れないようにしてください。目に触れてしまった場合、流水で15分間洗い流してください。皮膚に触れてしまった場合、石鹼と水で念入りに洗ってください。誤って飲み込んでしまった場合は、かかりつけ医に速やかにご連絡ください。

採取の前に

重要： 医療従事者と相談せずに医薬品やサプリメントの使用を中止しないでください。

下剤が必要な場合便の採取が困難な場合は、採取予定時刻の24時間前に経口リン酸ソーダ、クエン酸マグネシウム、オオバコ繊維ベースの下剤を使用してもかまいません。浣腸は蒸留水のみを使用して行うことができます。座薬や鉱物油は使用しないでください。

以下を服用しないようご注意ください：

- 採取前2日間の消化酵素、制酸剤、アスピリン、その他のNSAIDS
- 採取前2週間のプロバイオティクスサプリメント
- 抗真菌薬や抗生物質を服用している方は、服用を完了後、3日過ぎてから採取してください。
- 月経中や痔からの出血が活発な場合は、便を採取しないでください。


始めましょう

1



検査キットの中にあるバーコードシートを確認して記入します。黄色いキャップのバイアルにバーコードシールを貼ります。情報を読み取ることができ、採取日、時刻が記入され、名前が検査注文用紙に記載されているのと同じであることを確認してください。

2

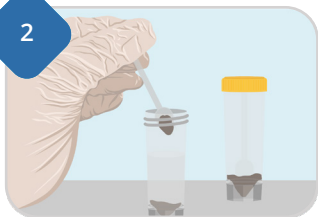

蓋についているスプーンを使って、黄色のキャップがついたバイアルに試料の断片を加え、保存液と合わせて充填ラインに達するまで試料の異なる部分から断片を採取し、**加えます**。

3



バイアルを閉じ、約30秒間激しく振り混ぜます。配送の準備まで冷蔵庫で保存してください。

残った試料や採取用具は処分してください。トレイをトイレに流さないでください。

包装の準備

各検体に記入済みのバーコードシールが貼られていること、および検査注文で提供された情報と名前が一致していることを確認します。

1

保管していた包装資材を用意します。透明のジップロック式バイオハザードバッグ、採取済みの検体、吸収性パックシートを用意します。

2

黄色のキャップのバイアルをジップロック式の透明バイオハザードバッグに入れます。吸収性パックシートを追加し、ジップロック機能を使用してバッグを閉じます。




+



3

封がされたジップロック式バイオハザードバッグを検査キットボックスに入れます。

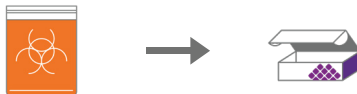

4

検査依頼書を使用する場合は、検査キットボックスに入れます。ふたを閉めます。検査キットに同梱されている配送手順カードを見て、採取した検体の配送方法を確認します。

次に起こること

Mosaic Diagnosticsの検査室で受領後、検査結果はあなたの医師または健康管理アドバイザーに通常2～3週間以内に送付されます。

あなたのかかりつけの医師は、結果をご自身と一緒に確認し、関心や懸念のある領域を特定し、適切な次のステップを提示します。検査の結果や健康への影響については、医師または健康管理アドバイザーに相談してください。Mosaic Diagnosticsの担当者は被験者またはご家族の方と直接検査結果についてお話することできません。

ご質問がございますか？

試料の採取や配送のプロセスに関するご質問がある場合、下記にお問い合わせください：



電話 | 当社のカスタマーサービスチームは、月曜～金曜 午前8時～午後5時（米国中部標準時）に800-288-0383でお問い合わせをお受けします



Eメール | CustomerService@MosaicDX.com



MOSAIC[™]
DIAGNOSTICS
Formerly Great Plains Laboratory