



MOSAIC™
DIAGNOSTICS
Formerly Great Plains Laboratory

Reunir pistas para hacer descubrimientos

Anexo del kit de recolección de orina

Prueba de aminoácidos



Componentes adicionales del kit de prueba

Su médico ordenó una prueba que requiere de frascos adicionales. Revise las instrucciones del kit de recolección de orina para las instrucciones complementarias para estos frascos.



Frasco con tapa blanca

Mantenga alejados todos los componentes de esta prueba del alcance de los niños y mascotas

El frasco para el espécimen contiene alrededor de 60 mg de ácido oxálico. No lo inhale ni ingiera. Si se derrama, límpielo con un paño húmedo. En caso de contacto con la piel, lávese con jabón y mucha agua. En caso de contacto con los ojos o ingestión accidental, enjuague con mucha agua. Busque atención médica si lo necesita.

Antes de hacerse la prueba de aminoácidos

Importante: No suspenda ningún medicamento ni suplemento sin antes consultarlo con su médico.

- **No se realice esta prueba si está tomando antibióticos.** Si está tomando antibióticos, asegúrese de terminar el tratamiento y esperar 48 horas para realizar la recolección.
- **Siga una dieta normal que contenga proteínas** el día anterior y durante la recolección. Si es posible, suspenda los suplementos y medicamentos no esenciales 48 horas antes de la recolección.
- **Suspenda los suplementos de aminoácidos** 48 horas antes de la recolección para no afectar los resultados.

Comencemos

1. **Recolecte la muestra** como se indica en las instrucciones del kit de recolección de orina.
2. **Llene el frasco de tapa de blanca** con la orina del vaso de recolección. Llénelo hasta la línea de llenado. Asegúrese de mantener al menos 5 ml de orina en el vaso de recolección.
3. **Ponga la tapa de los frascos** y asegúrese de que cierren bien. Agite con suavidad el frasco para mezclar la orina con el conservador.
4. **Ponga la tapa al vaso de recolección** que debería contener al menos 5 ml de la orina restante.
5. **Asegúrese de que cada muestra tenga su etiqueta de código de barras.**
6. **Coloque el vaso de recolección y los frascos en el congelador** por al menos cuatro horas o hasta que se congele (30 días máximo). Marque el recuadro en la etiqueta de código barras para indicar que la muestra se congeló.
7. **Consulte las instrucciones de recolección de orina** sobre cómo empacar todas las muestras (página 11)



Asegúrese de que todas las muestras estén etiquetadas.

No se aceptan muestras sin etiqueta.