

Test de glyphosate - Eau

Contenu du kit d'examen

Commencez par identifier ces huit éléments de votre kit d'examen.

Boîte de kit de l'examen	Formulaire de demande de test
Récipient de prélèvement	Sac transparent à fermeture éclair pour déchets dangereux
Sac de glace	Feuille d'emballage absorbante
Sac isotherme argenté	Paquet pour expédition au laboratoire

Préparation de votre examen

- **Veillez lire attentivement toutes les instructions.**
- **Placez le sac de glace à plat dans votre congélateur afin qu'il soit prêt pour l'expédition avec votre échantillon.**
- **Localisez et remplissez le formulaire à code-barres de votre kit d'examen.** Placez un autocollant à code-barres sur chaque échantillon prélevé. Assurez-vous que les informations sont lisibles et comprennent la date ainsi que l'heure du prélèvement et que le nom correspond à celui indiqué sur la commande d'examen.
- **Déterminez le robinet qui vous servira d'échantillon de source d'eau** (de préférence votre source d'eau potable).

Pour les expéditions sur le territoire des États-Unis :

Il est important de prélever votre échantillon de **lundi à jeudi** afin qu'il puisse parvenir à notre laboratoire avant le week-end.

Pour les expéditions en dehors des États-Unis :

Prélevez et expédiez votre échantillon un **lundi ou un mardi**.

Commençons maintenant !

1. Avant le prélèvement d'eau, retirez le couvercle du récipient de prélèvement et posez-le délicatement le au sol en retournant la face intérieure vers le haut sur une surface propre et sèche. Faites l'effort de ne pas toucher l'intérieur du récipient ou du couvercle. Ne laissez aucune surface entrer en contact avec l'intérieur du récipient.
2. Ouvrez le robinet et laissez l'eau couler pendant 30 secondes.
3. Rapprochez le récipient de la source d'eau pour prélever l'échantillon.
4. Remplissez convenablement le récipient. **NE PAS** remplir exagérément
5. Après le prélèvement de l'échantillon, refermez hermétiquement le couvercle.
6. Congelez l'échantillon d'eau pendant au moins 4 heures avant l'expédition. Gardez-le au congélateur jusqu'au moment de l'expédition.

Préparation de l'échantillon à expédier

1. Assurez-vous que l'étiquette à code-barres sur chaque tube de prélèvement a été remplie et correspond à la commande d'examen (ou au formulaire de demande d'examen).
2. Retirez le récipient de prélèvement congelé, le paquet de glace congelé ainsi que les flacons des autres prélèvements conservés au congélateur et vérifiez l'étanchéité des couvercles.
3. Placez tous les échantillons congelés et la feuille d'emballage absorbante dans un sac à fermeture éclair pour déchets dangereux et scellez ce sac.
4. Placez le sac à fermeture éclair pour déchets dangereux dans un sac isotherme argenté ainsi que le paquet de glace congelé et scellez.
5. Placez le sac isotherme argenté rempli dans la boîte de kit d'examen. Si le formulaire papier de demande d'examen est utilisé, placez-le également dans la boîte. Fermez le couvercle.
6. Consultez les instructions dans votre kit d'examen pour les détails sur l'expédition de vos prélèvements.



**Assurez-vous que tous les échantillons ont été étiquetés.
Les échantillons non étiquetés ne seront pas acceptés.**

Quelle est la prochaine étape ?

Vos résultats d'examens seront communiqués à votre médecin ou conseiller de santé généralement deux semaines après réception par les laboratoires Mosaic Diagnostics.

Il appartiendra à votre médecin ou à votre conseiller de santé d'examiner les résultats avec vous, d'identifier les domaines d'intérêt ou de préoccupation et de définir avec vous les prochaines étapes à suivre.

Avez-vous des questions ?

Si vous avez des questions concernant les prélèvements ou les expéditions, n'hésitez pas à nous contacter :

Téléphone | Notre aimable équipe du service client est disponible du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00, heure normale du centre au 800-288-0383

Email | CustomerService@MosaicDX.com

Pour toute question sur les résultats de vos examens ou les impacts sur votre santé, veuillez vous adresser à votre médecin ou conseiller de santé. Le personnel de Mosaic Diagnostics ne peut pas discuter des résultats d'examens directement avec les patients ou leurs familles.

