

Los resultados de sus pruebas se entregarán a su profesional de la salud en un plazo de 2 a 3 semanas después de que se reciban las muestras en Mosaic Diagnostics. Dependerá de su profesional de la salud revisar los resultados con usted, identificar cualquier área de interés o inquietud, y trabajar con usted para establecer los próximos pasos adecuados. El personal de Mosaic Diagnostics no puede analizar los resultados de las pruebas directamente con los pacientes o sus familiares.



## Instrucciones de recolección: Perfil de la vía de metilación del ADN de saliva

Su médico ha solicitado que realice esta prueba porque el análisis de ADN es una herramienta que permite a los médicos identificar polimorfismos de un solo nucleótido (SNP, por sus siglas en inglés) que pueden afectar vías bioquímicas críticas, como el metabolismo de la metionina, la desintoxicación, el equilibrio hormonal y la función de la vitamina D. Mosaic Diagnostics está aquí para ayudarle a dar el siguiente paso.

### Contenido del kit de prueba

Comience identificando estos elementos de su kit de prueba.

Si faltan componentes o están vencidos, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Mosaic al 800-288-0383.



Caja del kit de prueba



Cuatro hisopos con punta de algodón (en 2 fundas)



Formulario de consentimiento informado



Sobre de devolución de recolección de hisopos



Paquete de envío para laboratorio (o sobre de burbujas morado)

### Antes de comenzar

Complete el formulario de consentimiento informado.

Envíe su muestra de lunes a jueves (fuera de los EE. UU., lunes o martes). Si recolecta la muestra el fin de semana, espere hasta el lunes para realizar el envío.

## Empecemos

Complete la información en la etiqueta adhesiva del código de barras Y en el sobre escribiendo el nombre del paciente, su fecha de nacimiento y la fecha de recolección. Coloque la etiqueta adhesiva del código de barras en el sobre, asegurándose de que la información escrita en el sobre sea visible. Use un bolígrafo de tinta azul o negra; no use bolígrafos con punta de fieltro ni marcadores de borrado en seco. **Nota: Las muestras no etiquetadas serán rechazadas.**

- 1 Enjuáguese la boca con agua fría antes de recolectar la muestra.
- 2 Cada funda de papel contiene dos hisopos. Se recogerá un total de cuatro hisopos. Abra una de las fundas y retire un hisopo a la vez. Conserve la funda de papel para devolver el hisopo después de la recolección.
- 3 Trague para eliminar el exceso de saliva. Con un movimiento circular, frote el hisopo en el interior de una mejilla unas 20 veces, con suficiente presión para que la mejilla se empuje hacia afuera.
- 4 Agite suavemente el hisopo a través del aire para secarlo durante 3 minutos. Luego, vuelva a colocar el hisopo en la funda y retire el segundo hisopo de la misma funda.
- 5 Repita los pasos 4 y 5 con el mismo lado de la mejilla.
- 6 Abra la segunda funda y repita el mismo proceso usando el otro lado de la mejilla para ambos hisopos.

## Preparación del paquete

1

Coloque las dos fundas que contienen los hisopos secos en el sobre de devolución de recolección de hisopos y ciérrelo.



2

Coloque el sobre de devolución de recolección de hisopos con los hisopos secos y el formulario de consentimiento informado completado en el paquete de laboratorio (o el sobre de burbujas morado) y ciérrelo.



3

Busque la tarjeta de instrucciones de envío incluida en su kit de prueba para obtener detalles sobre cómo enviar sus recolecciones.

## ¿Tiene alguna pregunta?

If you have questions about any aspect of the specimen collection or shipping process, please feel free to contact us:



**Por teléfono** con nuestro amable equipo de atención al cliente al 800-288-0383, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del centro.



**Por correo electrónico** a [CustomerService@MosaicDX.com](mailto:CustomerService@MosaicDX.com)