



MOSAIC™
DIAGNOSTICS
Formerly Great Plains Laboratory

Instructions relatives au kit de prélèvement pédiatrique

Effectuer le prélèvement chez un nourrisson

1. Lavez vos mains avant de commencer.
2. Nettoyez les parties génitales du nourrisson. Laissez sécher la zone nettoyée à l'air libre.
3. Décollez le papier de protection du sac de prélèvement de sorte à dévoiler l'autocollant hypoallergénique.
4. Écartez les jambes du nourrisson, puis fixez fermement le sac de prélèvement urinaire pédiatrique sur la partie génitale de l'enfant.
 - Pour les filles : commencez à coller l'adhésif sur la peau vers le bas et remontez progressivement vers le haut, en séparant les lèvres vaginales. Appuyez



fermement sur la peau tout autour du vagin (lèvres) en laissant un excédant de sac vers les pieds. Appuyez fermement sur la peau tout autour du vagin (lèvres) en laissant un excédant de sac vers les pieds.

- Pour les garçons : positionnez naturellement le pénis à travers l'ouverture du sac en laissant l'excédant du sac vers les pieds. Appuyez fermement sur l'adhésif sur tout le périmètre sans le plisser.
5. Remettre une couche directement au-dessus du sac. Nous recommandons que vous coupiez un trou dans la couche et tiriez le sac de prélèvement pédiatrique à travers afin de le maintenir en place. Si nécessaire, vous pouvez enfiler une deuxième couche sur la première afin d'éviter que le sac n'irrite la peau.

Après le prélèvement des échantillons

1. Une fois que le nourrisson a uriné dans le sac de prélèvement, versez l'échantillon du sac vers le récipient de prélèvement.
2. Reportez-vous aux instructions de prélèvement urinaire pour les détails supplémentaires. Reportez-vous aux instructions de prélèvement urinaire pour les détails supplémentaires. Pour toute question, notre aimable équipe service clients est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure normale du Centre, au 800-288-0383