



**MOSAIC™**  
**DIAGNOSTICS**  
*Formerly Great Plains Laboratory*

# 小児用採尿キット説明書

## 小児用採尿バッグの使用の際に

1. 始める前に手を洗います。
2. 乳児の生殖器領域を清潔にします。清潔になった部分を空気で乾燥させます。
3. 採尿バッグの裏紙を剥がし、低アレルギー性接着剤を露出させます。
4. 乳児の脚を開き、小児用採尿バッグを乳児の生殖器領域にしっかりと取り付けます。
  - 女児の場合：皮弁箇所での接着を下から上に行い、陰唇を分けながら、上方向に接着作業を行ってください。膣周囲（陰唇）の皮膚をしっかりと覆い、バッグの余剰部分を脚の方に向けます。



- 男児の場合：陰茎の位置を自然な状態でバッグの中に配置し、バッグの余剰部分を脚の方に向けます。しわが寄らないように、接着剤を周囲全体にしっかりと押し付けます。
5. おむつを直接バッグに入れます。おむつに穴を開け、小児用採尿バッグを引っ張り出して、バッグを安定させることをお勧めします。必要に応じて、バッグが皮膚を刺激しないように、1つ目のおむつの外側に2つ目のおむつをつけることができます。

## 検体の採取後

1. 乳児が採尿バッグに排尿したら、バッグから採尿カップに尿検体を移します。
2. その他の詳細については、「尿の採取手順」をご覧ください。ご質問がある場合、当社のカスタマーサービスチームが月曜～金曜 午前8時～午後5時（米国中部標準時）、800-288-0383でお問い合わせをお受けします。