



MOSAIC™
DIAGNOSTICS
Formerly Great Plains Laboratory

Pediatryczny zestaw do pobierania próbek – instrukcja obsługi

Stosowanie pediatrycznego woreczka do pobierania próbek moczu

1. Umyj najpierw ręce.
2. Oczyszcz okolice narządów płciowych niemowlęcia.
Odczekaj, aż oczyszczony obszar wyschnie.
3. Odklej pasek zabezpieczający z woreczka,
odstaniając hipoalergiczną taśmę
samoprzylepną.
4. Rozchyl nogi niemowlęcia, a następnie przyklej
woreczek w okolicę narządów płciowych dziecka.



- U dziewczynek: przyklej woreczek od dołu do góry, rozdzielając wargi sromowe. Mocno dociśnij do skóry otaczającej pochwę (wargi sromowe). Woreczek powinien być skierowany w stronę stóp.
 - U chłopców: włóż penisa przez otwór woreczka, kierując woreczek w kierunku stóp. Mocno dociśnij taśmę na całej długości, uważając, by jej nie marszczyć.
5. Nałóż pieluszkę bezpośrednio na woreczek. Sugerujemy wycięcie otworu w pielusze i przeciągnięcie przez niego woreczka, co pozwoli utrzymać go stabilnie w miejscu. W razie potrzeby można założyć drugą pieluchę, aby zapobiec podrażnieniu skóry przez woreczek.

Po pobraniu próbki

1. Gdy dziecko odda mocz do woreczka, przelać próbkę moczu z woreczka do pojemnika na próbkę.
2. Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji dotyczącej pobierania próbek moczu. W przypadku jakichkolwiek pytań nasz zespół obsługi klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 CST pod numerem 800-288-0383