



**MOSAIC™**  
**DIAGNOSTICS**  
*Formerly Great Plains Laboratory*

# Instrucciones para el kit de recolección pediátrico

## Cómo usar la bolsa de recolección pediátrica

1. Lávese las manos antes de comenzar.
2. Limpie el área genital del bebé. Permita que el área, ahora limpia, se seque con el aire.
3. Despegue el papel protector de la bolsa de recolección, para exponer el adhesivo hipoalérgico.
4. Separe las piernas del bebé, y pegue firmemente la bolsa de recolección el área genital.
  - Para la niñas: Empiece de abajo hacia arriba con el adhesivo en el pliegue de la piel, separando los labios vaginales y vaya hacia arriba. Presione con firmeza a la piel, rodeando el área vaginal (labios) con el resto de la bolsa hacia los pies.



- Para los niños: Coloque el pene en la abertura de la bolsa con el resto hacia los pies. Presione con firmeza el adhesivo por todo el perímetro sin arrugar la bolsa.
5. Ponga el pañal sobre la bolsa. Le sugerimos que haga un orificio en el pañal y saque la bolsa de recolección a través del mismo para que la bolsa quede bien colocada. Si es necesario, puede poner un segundo pañal por encima del primero para evitar que la bolsa irrite la piel.

## Después de la recolección de la muestra

1. Una vez que el bebé orine en la bolsa de recolección, transfiera la orina de la bolsa al vaso de recolección.
2. Vea las instrucciones de recolección de orina para más detalles. Para cualquier duda, contacte a nuestro equipo de servicio al cliente que está disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. CST al 800-288-0383.