



MOSAIC™
DIAGNOSTICS
Formerly Great Plains Laboratory

Información de envío dentro de los Estados Unidos

- **La muestra ya debe estar empacada** en la caja del kit de pruebas o el sobre morado con plástico burbuja. Si no lo ha hecho, consulte las instrucciones de recolección de muestras.
- **Los materiales de envío fueron prepagados,** y no es necesario pagar tarifas adicionales a UPS. Si UPS le intenta cobrar los costos de envío, póngase en contacto con nuestro personal para recibir asistencia al 800-288-0383. Mosaic Diagnostics no se hace responsable de los pagos hechos directamente a UPS.


Como recordatorio, los kits de prueba solo deben enviarse de lunes a jueves, excepto por las muestras de heces que deben mandarse antes del miércoles.



- **Para las muestras en la caja del kit de pruebas:**



Coloque la caja del kit de pruebas en el paquete de envío al laboratorio y séllelo. ¡Está listo para su envío!

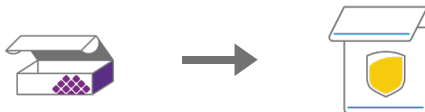

- **Para las muestras en el sobre morado con plástico burbuja:**



La etiqueta de envío ya está adjunta y está listo para enviarlo.

- **Lleve la(s) muestra(s) empacada(s) a la sucursal de UPS.** No use los buzones de UPS. Consulte www.ups.com/dropoff para encontrar su sucursal más cercana. También puede pedir una recolección a domicilio llamando al 800-742-5877. Dígales que necesita programar la recolección de su paquete con una etiqueta de retorno.
- **Escriba el número de rastreo para su seguridad.**