



**MOSAIC™**  
**DIAGNOSTICS**  
*Formerly Great Plains Laboratory*



## 美国以外地区装运信息

- 您的样本应该已经**包装**到检测试剂盒或紫色气泡信封袋中。如果没有，请参考您的采样说明。

友情提示：检测试剂盒应仅在周一至周三发货，粪便采样除外，粪便采样应在周二之前发货。



- **填写装运单据:**

- **海关需要商业发票。**您将在样本试剂盒中找到 3 份完整的副本。如果您的试剂盒中没有副本, 您可以在 [MosaicDX.com/shipping](https://MosaicDX.com/shipping) 上下载。
- **生物样本运输声明** (仅适用于印度和澳大利亚)
  - 请将 MosaicDX 列为“收货人”, 说明样本用于“实验室研究/人类非传染性疾病”, 并指明样本类型 (即尿液、毛发、粪便等)。
  - 您需要以“声明者”的身份在第二页输入信息。包括您的姓名、联系方式和电子邮件地址。




有关海关文件和装运估算的更多信息, 请扫描二维码或访问 [MosaicDX.com/shipping](https://MosaicDX.com/shipping)

- **检测试剂盒到达 MosaicDX 后, 将立即评估运费。**
  - 运费和检测费用 (除非预付) 将记入您提供的信用卡。有关装运估算的内容, 请扫描第 2 页上的二维码。
  - 运费由 FedEx 确定, 可能因国家而异, 如有更改, 恕不另行通知。
- **务必使用官方 MosaicDX 装运标签**
  - 如果您的装运标签丢失或损坏, 请通过 [customerservice@mosaicdx.com](mailto:customerservice@mosaicdx.com) 联系 MosaicDX。美国海关可能会延迟或拒收标签错误的包裹。
  - MosaicDX 对因任何原因造成的国际货物丢失或延误概不负责。

- 检测试剂盒中采集的样本：

将检测试剂盒放入实验室装运包装并密封。

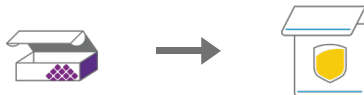

将透明运输袋附在实验室装运包装的外侧，这样做不会干扰标签。将商业发票和任何其他所需的装运单据放入此透明袋中。装好后即可随时发货！

- 紫色气泡信封袋中采集的样本：



将透明袋附在气泡信封袋的外侧，这样做不会干扰标签。将商业发票和其他所需的装运单据放在里面。装好后即可随时发货！

- 将包装好的样本送到 **FedEx 快递站**。请勿使用投递箱。访问 [www.fedex.com](http://www.fedex.com) 找到您附近的快递站。您也可以通过访问 [FedEx.com](http://FedEx.com) 申请 FedEx 取件。
- 为确保运输安全，请注意跟踪运输单号。