



MOSAIC™
DIAGNOSTICS
Formerly Great Plains Laboratory



美国以外地区 装运信息

- **您的样本应该已经包装到检测试剂盒或紫色气泡信封袋中。如果没有，请参考您的采样说明。**

温馨提示，检测试剂盒只能在周一至周二发货。



- **填写装运单据：**
 - **海关要求的商业发票**现在包含在电子标签中。您无需执行任何操作。
 - **生物样本运输声明**（仅适用于印度和澳大利亚）
 - 请将 MosaicDX 列为“收货人”，说明样本用于“实验室研究/人类非传染性疾病”，并指明样本类型（即尿液、毛发、粪便等）。
 - 您需要以“声明者”的身份在第二页输入信息。包括您的姓名、联系方式和电子邮件地址。
 - **某些国家/地区需要 CDC 声明。**
如果需要，它将包含在您的检测试剂盒中。



有关海关文件和装运估算的更多信息，请扫描二维码或访问 MosaicDX.com/shipping

- **检测试剂盒到达 MosaicDX 后, 将立即评估运费。**
 - 运费和测试费用 (除非预付) 将通过所提供的付款方式收取。有关装运估算的内容, 请扫描第 2 页上的二维码。
 - 运费由 UPS 确定, 可能因国家/地区而异, 如有更改, 恕不另行通知。



将所有样本装在一个包裹中运送, 以避免多重运费。

- **务必使用官方 MosaicDX 装运标签**
 - 如果您的装运标签丢失或损坏, 请通过 customerservice@mosaicdx.com 联系 MosaicDX。美国海关可能会延迟或拒收标签错误的包裹。
 - MosaicDX 对因任何原因造成的国际货物丢失或延误概不负责。

- **准备包装：**



将透明袋粘贴在实验室装运包或紫色气泡袋的外部，以免影响标签。将商业发票和其他所需的装运单据放在里面。装好后即可随时发货！

- **将包装好的样本送到 UPS 服务站。** 请不要使用 UPS 的投递箱。如果将包裹送至 UPS 取件点，请确保该地点具备处理快递货件的能力。请访问 www.ups.com/dropoff 找到您附近的服务站。您也可以通过访问 UPS.com 申请 UPS 取件。通知 UPS 代理商，您已准备好“进口管制返回包”以备取件。
- **请记住运单号，以确保运输安全。**