

検体採取のインストラクション

腸内フローラ検査

GI360™ マイクロバイオーム・プロファイル

体内の内なる世界を覗く窓

現代医学は、腸内微生物が私たちの健康に与える影響にますます注意を払うようになっていきます。主流の開業医でさえ、私たちが健康的な生活を維持し、様々な問題を解決する上で、友好的な腸内細菌叢が果たす役割を認めています。

検体は月曜日、火曜日、水曜日1にご発送ください。週末に採取を完了した場合は、月曜日まで検体を保管して発送してください。

¹日本からの研究所へ直接の送付では、発送に余裕を持たせるため、検体は月曜日または火曜日に採取してください。

採取する前に

重要事項: 医療従事者に相談せずに、薬やサプリメントを中止しないでください。

下剤が必要な場合

便の採取が困難な場合は、採取予定時刻の24時間前から、リン酸ソーダ、クエン酸マグネシウム、またはサイリウム繊維ベースの下剤を経口投与することができます。浣腸は蒸留水のみは使用してもよいです。座薬やミネラルオイルは使用しないでください。

以下の摂取は控えてください:

- 消化酵素、制酸剤、アスピリンまたはその他の非ステロイド性抗炎症薬の使用はお止めください。
- 採取の2週間前からプロバイオティクスのサプリメントの摂取はお控えください。
- 抗真菌薬や抗生物質を服用している場合は、服用を終えてから3日後に採取してください。
- 月経中や痔からの出血がある場合は、検体を採取しないでください。

検査キットの内容

検査キットのこれらの中身をご確認ください。



検査キットの箱



黄色の蓋のチューブ



採取トレイ



使い捨て手袋



透明なバイオハザードジップロックバッグ



出荷用ラボラトリーパック



吸収性パッキングシート

すべてのキット構成部品は、ペットや子供の手の届かないところに保管してください。チューブ内の保存液をこぼさないように注意し、皮膚や目に触れないようにしてください。目に入った場合は、水で15分間十分に洗い流してください。皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗ってください。誤って摂取した場合は、直ちに医師に連絡してください。

ご質問はありますか？

検体採取や発送プロセスについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください



電話 | 当社のカスタマーサービス・チームが、月曜日から金曜日の午前8時から午後5時まで（米国中部標準時間）、800-288-0383にて対応いたします（英語のみ）。



電子メール
CustomerService@MosaicDX.com

採取開始




1 検査キットのバーコード・シートを探し、ご記入ください。黄色の上蓋のついたチューブにバーコードシールを貼ります。情報が見やすく、採取日時、名前が検査依頼書に記載されたものと一致していることを確認してください。



2 手袋をはめ、便検体を採取トレイに集めてください。尿や水が検体に触れないようにしてください。



3 蓋に付いているスプーンを使って、検体の一部を黄色のチューブに加え、検体と保存液を合わせたものが充填ラインに達するまで、検体の様々な部分から採取します。

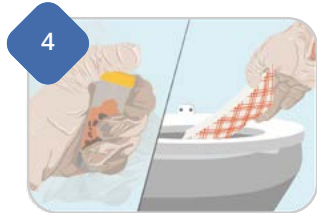


4 チューブを密封し、約30秒間激しく振ってください。その後、出荷準備が整うまで冷蔵庫に入れて保管してください。残った検体と採取物は廃棄してください。トレイは水に流さないでください。

パッケージの準備

1 黄色の上部が付いたチューブをバイオハザードジップロックバッグに入れます。吸収性パッキングシートを加え、ジップロックの機能を使って密封します。



2 密封したバイオハザードジップロックを検査キットの箱に戻し、蓋を閉めます。

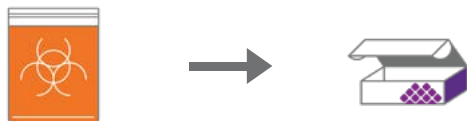

3 検査キットに同梱されている発送方法説明カードに、採取した検体の発送方法の詳細が記載されていますのでご参照ください。

検査結果について

検査結果はモザイク・ダイアグノスティックスに到着後、2~3週間以内にかかりつけの医師に届きます。

検査結果を医師と一緒に確認し、気になるところや心配なところを特定し、適切な次のステップを一緒に考えます。モザイク・ダイアグノスティックスのスタッフは、検査結果について患者さんやそのご家族と直接お話しすることはできません。

詳細は [MosaicDX.com](https://mosaicdx.com) をご覧ください。

(800) 288-0383 customerservice@mosaicdx.com
8400 W 110th Street, Suite 500, Overland Park, KS 66210



すべての商標は当社およびその関連会社が所有しています。
©2025 Mosaic Diagnostics. 無断複写・転載を禁じます。

MDX-INST-MICROBIOLOGY-JAPANESE 7-2025 v.1