


Preparación del envío

1 Complete en la tarjeta y en la etiqueta del código de barras el nombre del paciente, fecha de nacimiento, y fecha de recolección. Pegue la etiqueta con código de barras en la tarjeta asegurando que la información escrita quede visible. Use bolígrafo azul o negro; no usar marcadores. **Nota: Las muestras sin etiquetar serán rechazadas.**

2 Coloque la tarjeta dentro de la bolsa zip-lock junto con el desecante y ciérrela.



3 Introduzca la bolsa en el sobre morado o en el "laboratory pak".

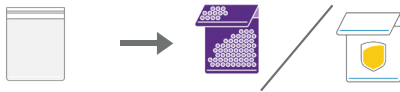

4 Revise la tarjeta de instrucciones de envío incluida en el kit.

Para obtener instrucciones en línea, utilice el código QR o visite mosaicdx.com/instructions.



¿Preguntas?

Si tiene dudas sobre la recolección o el envío por favor contactar:



Llame a nuestro amable equipo de atención al cliente, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 CST, al 800-288-0383.



Envíe un correo electrónico a: customerservice@mosaicdx.com



Instrucciones de Recolección: Muestra de Sangre Seca (Dried Blood Spot)

Su profesional de la salud ha recomendado esta prueba porque la recolección mediante gota de sangre seca ofrece una forma sencilla, conveniente y eficaz de obtener la muestra necesaria. Mosaic Diagnostics está aquí para ayudarle a dar este siguiente paso.

Contenido del Kit

Antes de comenzar, identifique los elementos incluidos en su kit.

Si falta algo o algún componente está vencido, comuníquese con Atención al Cliente de Mosaic al 800-288-0383.



Caja o sobre del kit




Curita o vendaje



Lancetas (azules para adultos / amarillas para pediátrico)



Bolsa transparente tipo zip-lock

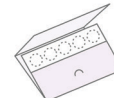

Tarjeta de recolección



Paquete desecante



Gasa estéril



Toallita antiséptica

Materiales de envío (uno de los siguientes):

- Sobre morado
- Bolsa "laboratory pak" para envío

Antes de comenzar

Beba bastante agua. Es importante estar bien hidratado. Recomendamos tomar dos vasos de 8 oz unas horas antes de la recolección.

Si toma anticoagulantes o medicamentos para trastornos de sangrado, consulte primero con su médico tratante. Medicamentos comunes: Coumadin, Plavix, Effient, Brilinta, Pradaxa, Eliquis, Xarelto o aspirina diaria.




Cómo comenzar

Seleccione el dedo que usará. Se recomienda usar la mano no dominante.

Lave sus manos con agua tibia y jabón durante al menos 2 minutos. Masajear el dedo ayuda a aumentar el flujo de sangre.




Abra una lanceta. Limpie el dedo seleccionado con la toallita antiséptica.

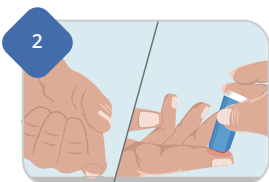

Apoye el dedo sobre una superficie firme y presione la lanceta para puncionar. Usar un costado del dedo suele causar menos molestia. Limpie la primera gota de sangre con la toallita antiséptica.



Masajee el dedo para ayudar a aumentar el flujo sanguíneo.

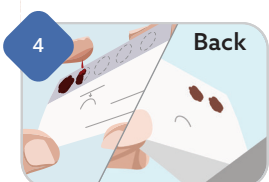

Llene cada círculo en la tarjeta de recolección dejando que la sangre caiga desde su dedo directamente sobre la tarjeta. Puede necesitar más de una gota por círculo. Tenga cuidado de no tocar la tarjeta con el dedo puncionado. Asegúrese de que la sangre traspase la tarjeta hasta el reverso. No presione el dedo contra la tarjeta.



Cuando haya terminado la recolección, limpie su dedo con la gasa estéril y coloque la curita. Si el dedo continúa sangrando, mantenga la mano por encima del nivel del hombro durante un minuto o hasta que deje de sangrar.

Use una segunda lanceta si es necesario para obtener más flujo sanguíneo. Las lancetas solo pueden utilizarse una vez. Una vez que las manchas estén secas, no coloque gotas adicionales en el mismo círculo. Use un dedo diferente para obtener más flujo sanguíneo si es necesario.

Después de la Recolección

Ahora que ha completado la recolección de la muestra de sangre seca, siga estos pasos para permitir que las muestras se sequen antes de enviarlas.


- Evite tocar o manchar los puntos de sangre.
- Doble la tarjeta por la línea punteada formando una "carpa" para que reciba aire por ambos lados.
- Déjela en un lugar limpio, lejos de mascotas, polvo, maquillaje o vapores de cocina.
- Deje secar al menos 3 horas antes de enviarla.
- Mantenga la tarjeta alejada de calor o luz solar directa.
- No coloque objetos encima ni la apoye sobre otras superficies.

Ejemplos de muestras correctas


A continuación, se muestran ejemplos de muestras aceptables. Las muestras aceptables muestran sangre que ha traspasado la parte posterior de la tarjeta. Las muestras incompletas o mal absorbidas serán rechazadas.

Aceptable

Prueba de cinco puntos

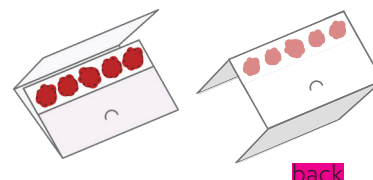


Prueba de tres puntos

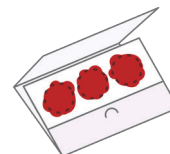


No aceptable

Prueba de cinco puntos

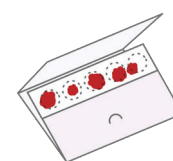

Prueba de tres puntos

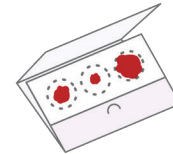

Consulte la página siguiente para ver cómo preparar el paquete.