

ご質問はありますか？

検体採取や発送方法に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



電話：当社カスタマーサービス：月曜日から金曜日まで（中部標準時 [CST] 午前8時～午後5時）、800-288-0383 にてお電話を受け付けております。



Email | CustomerService@MosaicDX.com

オンラインでの検体採取手順の説明書については、QRコードをご利用いただくか、mosaicdx.com/instructions をご覧ください。



検体採取手順： GI360の基本プロフィール

担当の医療従事者が本検査を依頼された理由は、便検体による検査が、消化管 (GI) マイクロバイオームの評価に加え、腸全体の健康状態および炎症マーカーを確認するうえで、現在最も効率的かつ包括的な方法であるためです。モザイク・ダイアグノスティックスは、この次のステップを進めるお手伝いをいたします。

検査キットの内容物

まず、検査キットに含まれる以下の部品を確認してください。


部品が不足している場合や期限切れの部品がある場合は、モザイクカスタマーサービス (800-288-0383) までご連絡ください。



検査キット
の箱



使い捨て手袋

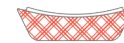

採取トレイ3つ



透明/バイ
オハザード
用ジップロ
ック袋



ラボラトリー
配送パック



黄色キャップのバイアル本
黒色キャップのバイアル本
バイアルの有効期限をご確認ください



吸収性梱包シート

注意：キットの内容物は、お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。保存液をバイアル内にこぼさないでください。また、皮膚や目への接触を避けてください。万が一目に入った場合は、15分間十分に水で洗い流してください。皮膚に付着した場合は、石鹸と水で十分に洗い流してください。誤飲した場合は、直ちに毒物管理センターへご連絡ください。www.mosaicdx.com/sds

検体採取開始前に

下剤が必要な場合

便検体の採取が困難な場合、予定された採取時間の24時間前に、経口用リン酸ソーダ、クエン酸マグネシウム、またはサイリウム繊維ベースの下剤をご使用いただけます。浣腸は蒸留水のみを使用して行ってください。坐薬やミネラルオイルは使用しないでください。

以下の摂取を中止してください：

検査の2週間前から：	抗生物質、駆虫薬、抗真菌薬、プロバイオティクスサプリメント、プロトンポンプ阻害薬 (PPI)、ビスマス製剤。
検査の2日前から：	アスピリンおよびその他の非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)、消化酵素、下剤 (特にミネラルオイル、ヒマシ油、グリセリン浣腸/坐剤)、活性炭、塩酸ベタイン、制酸薬、ベントナイトクレイ。



検体採取の手順

検体は連続した日に採取されることが望ましいですが、必須ではありません。ただし、最後の検体は最初の検体から7日以内に採取されなければなりません。

バイアル	1日目	2日目	3日目	採取後
黒色キャップのバイアル (3)	✓	✓	✓	バイアルを約30秒間、よく振ってください。発送前は冷蔵庫で保管してください。凍結は避けてください。
黄色キャップのバイアル (1)			✓	

3日間の便採取は寄生虫検査の信頼性を高めるため、米国疾病予防管理センター（CDC）により推奨されております。1日間の採取を選択される場合は、3日目の容器のみをご使用ください。1日目および2日目の容器は廃棄してください。

1

バーコードシールおよび検体容器に、患者様のお名前、生年月日、採取日の情報を全てご記入ください。バーコードシールは検体容器に貼り付け、容器に記入された情報が確認できる状態にしてください。ボールペンの青または黒インクをご使用ください。フェルトペンやホワイトボードマーカーはご使用にならないようお願いいたします。**注意：ラベルのない検体は受理できません。**

2

同梱の手袋を着用し、採取トレイに便のサンプルを採取してください。尿や水がサンプルに触れないようにご注意ください。

3

バイアルの蓋に付属のスプーンを使用し、検体の異なる部位から複数箇所を採取し、バイアルに追加してください。検体が目盛り線に達することを確認し、キャップを完全に締めてください。

1




+

2



+

3

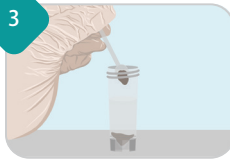

梱包の準備


1

バイアルにラベルを貼り、しっかりと密封してください。黄色と黒のキャップのバイアルをプラスチック製のバイオハザード袋に入れてください。吸収性梱包シートを追加し、密封してください。



2

密封したバイオハザード用ジップロック袋を検査キット箱に入れてください。

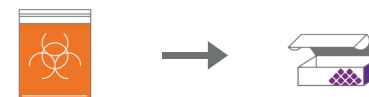

3

検査キットの箱を配送用ラボラトリーパックに入れてください。



配送方法の詳細については、配送指示カードをご確認ください。

検体は月曜日、火曜日、または水曜日に発送してください*。週末に採取された場合は、検体を月曜日まで保管の上、発送してください。

*米国外からの検体は月曜日または火曜日に発送してください。

検査結果は、検体がモザイク・ダイアグノスティックスに到着してから2～3週間以内に、担当の医療従事者へ送付されます。結果の確認、懸念事項の特定、および適切な次の対応については、担当の医療従事者が患者様と直接ご説明・ご相談いたします。なお、モザイク・ダイアグノスティックスの担当者は、患者様またはご家族の方と検査結果について直接お話しすることはできません。