

ご質問はありますか？

検体採取や発送方法に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



電話：当社カスタマーサービス：月曜日から金曜日まで（中部標準時 [CST] 午前8時～午後5時）、800-288-0383 にてお電話を受け付けております。



Email | CustomerService@MosaicDX.com



検体採取手順： ピロリ菌検査、またはゾヌリン検査

担当の医療従事者が本検査を依頼された理由は、便の分析により、ピロリ菌、またはゾヌリンの評価に役立つためです。モザイク・ダイアグノスティックスは、この次のステップを進めるお手伝いをいたします。

検査キットの内容物

まず、検査キットに含まれる以下の部品を確認してください。

部品が不足している場合や期限切れの部品がある場合は、モザイクカスタマーサービス（800-288-0383）までご連絡ください。



検査キットの箱



透明バイオハザード用ジップロック袋



採取トレイ



銀色保冷バッグ



吸収性梱包シート



ラボラトリー配送パック



使い捨て手袋



白色キャップのバイアル（バイアルの有効期限をご確認ください）



保冷剤（すぐに冷凍庫に平らにして保管）

オンラインでの検体採取手順の説明書については、QRコードをご利用いただくか、mosaicdx.com/instructions をご覧ください。



検体採取開始前に

すべての指示をよくお読みいただき、検体採取の手順をご確認ください。抗真菌薬や抗生物質を服用中の場合は、服用を完了した上で3日間お休みいただき、その後本検体採取を開始してください。医師から特に指示がない限り、消化酵素剤、制酸剤、アスピリンは検体採取の2日前から採取期間中までお控えください。処方薬の服用を中止される際は、必ず事前に医師にご相談ください。




検体採取の手順

1



バーコードシールおよび検体容器に、患者様のお名前、生年月日、採取日の情報を全てご記入ください。バーコードシールは検体容器に貼り付け、容器に記入された情報が確認できる状態にしてください。ボールペンの青または黒インクをご使用ください。フェルトペンやホワイトボードマーカーはご使用にならないようお願いいたします。**注意：ラベルのない検体は受理できません。**

2

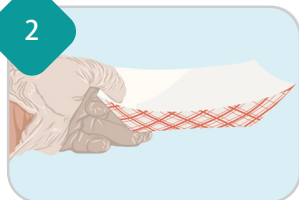

同梱の手袋を着用し、採取トレイに便のサンプルを採取してください。尿や水がサンプルに触れないようにご注意ください。

3



バイアルの蓋に付属のスプーンを使用し、検体の異なる部位から複数箇所を採取し、白色のバイアルに追加してください。検体が目盛り線に達することを確認し、キャップを完全に締めてください。

4



バイアルを密封し、発送の準備が整うまで冷凍庫に保管してください。

5



残りの検体および採取器具は廃棄してください。採取トレイは流さないでください。

梱包の準備

1

バイアルにラベルを貼り、しっかりと密封してください。白いキャップのバイアルを透明なバイオハザード用ジップロック袋に入れ、密封してください。




2

透明なバイオハザード対応ジップロック袋と冷凍保冷剤を、銀色の保冷バッグに入れてください。



3

銀色の保冷バッグを密封し、検査キットの箱に入れてください。

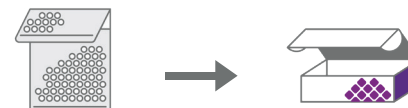

4

検査キットの箱を配送用ラボラトリーパックに入れてください。



配送方法の詳細については、配送指示カードをご確認ください。

検体は月曜日、火曜日、または水曜日に（米国外からの検体は月曜日または火曜日に）発送してください。週末に採取された場合は、検体を月曜日まで保管の上、発送してください。