

Avez-vous des questions?

Si vous avez des questions concernant un aspect quelconque du prélèvement d'échantillon ou du processus d'expédition, n'hésitez pas à communiquer avec nous :



Téléphone Notre sympathique équipe du Service à la clientèle est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, HNC au 800 288-0383



Courriel CustomerService@MosaicDX.com



Instructions relatives au prélèvement : Test H. Pylori, Zonuline, ou de Chimie des selles

Votre praticien a prescrit cet examen car l'analyse des selles peut fournir des informations précieuses sur la santé digestive et le fonctionnement gastro-intestinal. Mosaic Diagnostics est là pour vous accompagner dans cette démarche.

Contenu de la trousse d'épreuve

Commencez par identifier ces éléments de votre trousse d'épreuve.

S'il manque des composants ou s'ils sont périmés, communiquez avec le Service à la clientèle de Mosaic en composant le 800 288-0383.



Boîte de
la trousse
d'épreuve



Sac transparent
à fermeture
par pression
et glissière
pour produits
biologiques
dangereux



Flacon à bouchon
blanc – vérifiez la
date de péremption
du flacon



Sac à isolation
thermique
argenté



Feuille
d'emballage
absorbante



Emballage
d'expédition du
laboratoire



Gants jetables



Plateau de
prélèvement



Vessie de
glace (**placer
immédiatement
à plat dans le
congélateur**)

Pour obtenir des instructions en
ligne, utilisez le code QR ou accédez
au site mosaicdx.com/instructions



Avant de commencer :

Veuillez lire toutes les instructions et vous familiariser avec les procédures de prélèvement. Si vous prenez des médicaments antifongiques ou antibiotiques, terminez le traitement et attendez trois jours avant de commencer le prélèvement. Évitez de prendre des enzymes digestives, des antiacides et de l'aspirine pendant les deux jours précédant et pendant le prélèvement de l'échantillon, sauf indication contraire de votre médecin. N'arrêtez jamais de prendre des médicaments prescrits sans consulter votre médecin au préalable.




Commençons

1



Inscrivez le nom du patient, sa date de naissance et la date de prélèvement sur l'autocollant à code-barres ET sur le flacon. Collez l'autocollant à code-barres sur le flacon, en vous assurant que les renseignements inscrits sont visibles. Utilisez un stylo à bille à encre bleue ou noire; n'utilisez pas de crayon-feutre ou de marqueurs effaçables à sec. **Remarque : Les échantillons non étiquetés seront rejetés.**

2

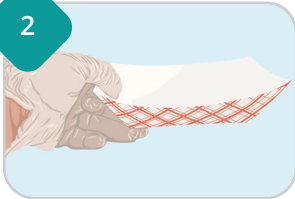

Enfilez un gant et prélevez votre échantillon dans le plateau de prélèvement. **Ne laissez pas l'urine ou l'eau toucher l'échantillon.**

3



Ajoutez des morceaux de votre échantillon au flacon à bouchon jaune à l'aide de la cuillère fixée sur le couvercle, en prélevant des morceaux de différentes parties de l'échantillon jusqu'à ce que l'échantillon combiné et le conservateur atteignent la ligne de remplissage.

4



Fermez hermétiquement le flacon et secouez vigoureusement pendant environ 30 secondes. Conservez au réfrigérateur jusqu'à l'expédition.

5



Éliminez les échantillons et le matériel de prélèvement restants. Ne jetez pas dans la toilette le plateau.

Préparation de l'emballage

1

Assurez-vous que le flacon congelé est étiqueté et hermétiquement fermé. Placez le flacon à bouchon blanc dans le sac transparent à fermeture par pression et glissière pour produits biologiques dangereux et scellez-le.



2

Placez le sac transparent à fermeture par pression et glissière pour produits biologiques dangereux et la vessie de glace dans le sac isotherme argenté.



3

Scellez le sac isotherme argenté et placez-le dans la boîte de la trousse d'épreuve.



4

Placez la boîte de la trousse d'épreuve dans l'emballage d'expédition du laboratoire.



Lisez la notice d'instructions relatives à l'expédition pour plus de détails sur l'expédition.

Les échantillons doivent être expédiés le lundi, le mardi ou le mercredi (à l'extérieur des États-Unis, le lundi ou le mardi). En cas de prélèvement la fin de semaine, conservez l'échantillon jusqu'au lundi pour l'expédier.