

ご質問はありますか？

検体採取や発送方法に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



電話：当社カスタマーサービス：月曜日から金曜日まで（中部標準時 [CST] 午前8時～午後5時）、800-288-0383 にてお電話を受け付けております。



Email | CustomerService@MosaicDX.com



検体採取手順： ピロリ菌、ゾヌリン、または便化学検査

担当の医療従事者がこの検査を指示したのは、便の分析によって、消化器の健康状態や消化管機能に関する有益な情報を得ることができるためです。モザイク・ダイアグノスティックスは、この次のステップを進めるお手伝いをいたします。

検査キットの内容物

まず、検査キットに含まれる以下の部品を確認してください。

部品が不足している場合や期限切れの部品がある場合は、モザイクカスタマーサービス（800-288-0383）までご連絡ください。



検査キットの箱



透明バイオハザード用ジップロック袋



採取トレイ



銀色保冷バッグ



吸収性梱包シート



ラボラトリー配送パック



使い捨て手袋



白色キャップのバイアル（バイアルの有効期限をご確認ください）



保冷剤（すぐに冷凍庫に平らにして保管）

オンラインでの検体採取手順の説明書については、QRコードをご利用いただくか、mosaicdx.com/instructions をご覧ください。



検体採取開始前に

すべての指示をよくお読みいただき、検体採取の手順をご確認ください。抗真菌薬や抗生物質を服用中の場合は、服用を完了した上で3日間お休みいただき、その後本検体採取を開始してください。医師から特に指示がない限り、消化酵素剤、制酸剤、アスピリンは検体採取の2日前から採取期間中までお控えください。処方薬の服用を中止される際は、必ず事前に医師にご相談ください。




検体採取の手順

1



バーコードシールおよび検体容器に、患者様のお名前、生年月日、採取日の情報を全てご記入ください。バーコードシールは検体容器に貼り付け、容器に記入された情報が確認できる状態にしてください。ボールペンの青または黒インクをご使用ください。フェルトペンやホワイトボードマーカーはご使用にならないようお願いいたします。**注意：ラベルのない検体は受理できません。**

2

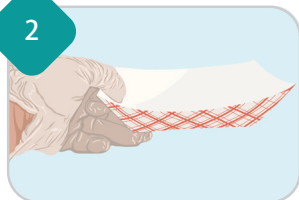

同梱の手袋を着用し、採取トレイに便のサンプルを採取してください。尿や水がサンプルに触れないようにご注意ください。

3




バイアルの蓋に付属のスプーンを使用し、検体の異なる部位から複数箇所を採取し、白色のバイアルに追加してください。検体が目盛り線に達することを確認し、キャップを完全に締めてください。

4



バイアルを密封し、発送の準備が整うまで冷凍庫に保管してください。

5

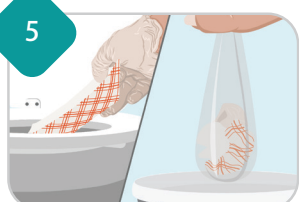

残りの検体および採取器具は廃棄してください。採取トレイは流さないでください。

梱包の準備

1

バイアルにラベルを貼り、しっかりと密封してください。白いキャップのバイアルを透明なバイオハザード用ジップロック袋に入れ、密封してください。




2

透明なバイオハザード対応ジップロック袋と冷凍保冷剤を、銀色の保冷バッグに入れてください。



3

銀色の保冷バッグを密封し、検査キットの箱に入れてください。

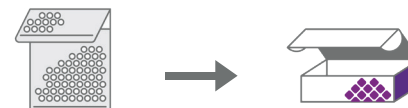

4

検査キットの箱を配送用ラボラトリーパックに入れてください。



配送方法の詳細については、配送指示カードをご確認ください。

検体は月曜日、火曜日、または水曜日に（米国外からの検体は月曜日または火曜日に）発送してください。週末に採取された場合は、検体を月曜日まで保管の上、発送してください。