


担当の医療従事者が本検査を依頼された理由は、便検体による検査が、消化管 (GI) マイクロバイームの評価や、腸全体の健康状態および炎症マーカーの確認において、最も効率的かつ包括的な方法であるためです。モザイク・ダイアグノスティックスは、この次のステップを進めるお手伝いをいたします。

検査キットの内容物

まず、検査キットに含まれる以下の部品を確認してください。

部品が不足している場合や期限切れの部品がある場合は、モザイクカスタマーサービス (800-288-0383) までご連絡ください。

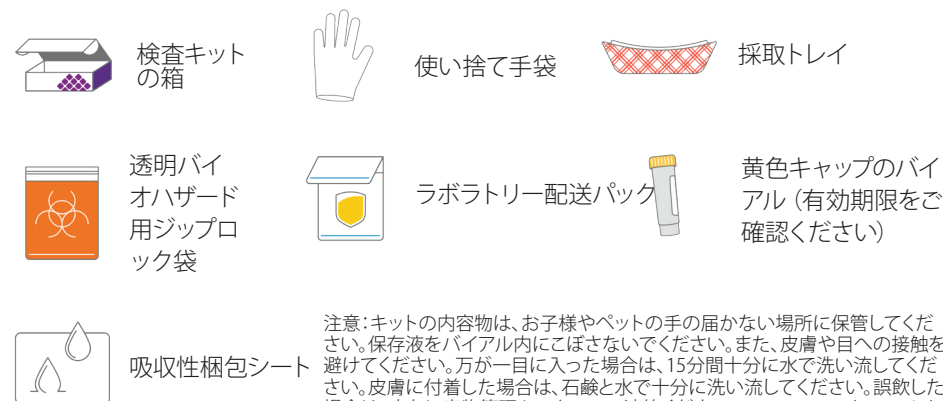

注意: キットの内容物は、お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。保存液をバイアル内にこぼさないでください。また、皮膚や目への接触を避けてください。万が一目に入った場合は、15分間十分に水で洗い流してください。皮膚に付着した場合は、石鹸と水で十分に洗い流してください。誤飲した場合は、直ちに毒物管理センターへご連絡ください。www.mosaicdx.com/sds

オンラインでの検体採取手順の説明書については、QRコードをご利用いただくか、mosaicdx.com/instructions をご覧ください。



検体採取開始前に

下剤が必要な場合

便検体の採取が困難な場合、予定された採取時間の24時間前に、経口用リン酸ソーダ、クエン酸マグネシウム、またはサイリウム繊維ベースの下剤をご使用いただけます。浣腸は蒸留水のみを使用して行ってください。坐薬やミネラルオイルは使用しないでください。

以下の摂取を中止してください：

検査の2週間前から：	抗生物質、駆虫薬、抗真菌薬、プロバイオティクスサプリメント、プロトンポンプ阻害薬 (PPI)、ビスマス製剤。
検査の2日前から：	アスピリンおよびその他の非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)、消化酵素、下剤 (特にミネラルオイル、ヒマシ油、グリセリン浣腸/坐剤)、活性炭、塩酸ペタイン、制酸薬、ベントナイトクレイ。

検体採取の手順

1




バーコードシールおよび検体容器に、患者様のお名前、生年月日、採取日の情報を全てご記入ください。バーコードシールは検体容器に貼り付け、容器に記入された情報が確認できる状態にしてください。ボールペンの青または黒インクをご使用ください。フェルトペンやホワイトボードマーカーはご使用にならないようお願いいたします。**注意：ラベルのない検体は受理できません。**

2




同梱の手袋を着用し、採取トレイに便のサンプルを採取してください。尿や水がサンプルに触れないようにご注意ください。

3

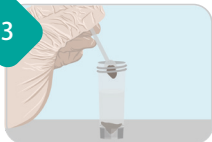

バイアルの蓋に付属のスプーンを使用し、検体の異なる部位から複数箇所を採取し、バイアルに追加してください。検体が目盛り線に達することを確認し、キャップを完全に締めてください。

4

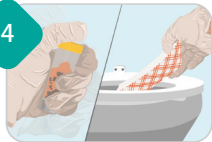

バイアルを密封し、約30秒間よく振ってください。発送準備が整うまで冷蔵庫に保管してください。残りの検体および採取用具は廃棄してください。トレイは流さないでください。

梱包の準備


1

バイアルにラベルを貼り、しっかりと密封してください。黄色のキャップのバイアルをプラスチック製のバイオハザード袋に入れてください。吸収性梱包シートを追加し、密封してください。



2

密封したバイオハザード用ジップロック袋を検査キット箱に入れてください。

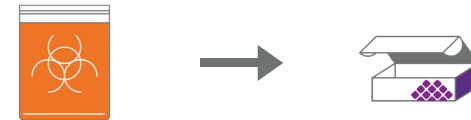

3

検査キットの箱を配送用ラボラトリーパックに入れてください。



配送方法の詳細については、配送指示カードをご確認ください。

ご質問はありますか？

検体採取や発送方法に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください：



電話：当社カスタマーサービス：月曜日から金曜日まで（中部標準時 [CST] 午前8時～午後5時）、800-288-0383 にてお電話を受け付けております。



Email | CustomerService@MosaicDX.com

検査結果は、検体がモザイク・ダイアグノスティックスに到着してから2～3週間以内に、担当の医療従事者へ送付されます。結果の確認、懸念事項の特定、および適切な次の対応については、担当の医療従事者が患者様と直接ご説明・ご相談いたします。なお、モザイク・ダイアグノスティックスの担当者は、患者様またはご家族の方と検査結果について直接お話しすることはできません。