

Les résultats de vos tests seront envoyés à votre professionnel de santé dans un délai de 4 à 5 semaines après la réception du ou des échantillons par Mosaic Diagnostics. Il incombera à votre professionnel de la santé de les examiner avec vous, d'identifier tout domaine d'intérêt ou de préoccupation et de travailler avec vous pour définir les prochaines étapes appropriées. Le personnel de Mosaic Diagnostics ne peut pas discuter des résultats de test directement avec les patients ou les membres de leur famille.

Pour obtenir des instructions en ligne, utilisez le code QR ou accédez au site [mosaicdx.com/instructions](https://mosaicdx.com/instructions)



## Instructions relatives au prélèvement : Profil de la voie de méthylation de l'ADN à partir de la salive

Votre praticien vous a demandé d'effectuer ce test parce que l'analyse de l'ADN est un outil qui permet aux cliniciens d'identifier les polymorphismes mononucléotidiques (SNP) susceptibles d'affecter des voies biochimiques critiques comme le métabolisme de la méthionine, la détoxification, l'équilibre hormonal et la fonction de la vitamine D. Mosaic Diagnostics est là pour vous aider à passer à l'étape suivante.

### Contenu de la trousse d'épreuve

Commencez par identifier ces éléments de votre trousse d'épreuve.

S'il manque des composants ou s'ils sont périmés, communiquez avec le Service à la clientèle de Mosaic en composant le 800 288-0383.



Boîte de la trousse d'épreuve



Quatre écouvillons à embout de coton (dans 2 manchons)



Formulaire de consentement éclairé



Enveloppe de retour du prélèvement par écouvillon



Emballage d'expédition du laboratoire (ou enveloppe à bulles violette)

### Avant de commencer

Remplissez le formulaire de consentement éclairé.

Expédiez votre échantillon du lundi au jeudi (pour les envois à l'extérieur des États-Unis, le lundi ou le mardi). En cas de prélèvement la fin de semaine, conservez l'échantillon jusqu'au lundi pour l'expédier.

## Commençons

Inscrivez le nom du patient, sa date de naissance et la date de prélèvement sur l'autocollant à code-barres ET sur l'enveloppe. Collez l'autocollant à code-barres sur l'enveloppe, en vous assurant que les renseignements inscrits sont visibles. Utilisez un stylo à bille à encre bleue ou noire; n'utilisez pas de crayon-feutre ou de marqueurs effaçables à sec. **Remarque : Les échantillons non étiquetés seront rejetés.**

1

Rincez-vous la bouche à l'eau froide avant de prélever votre échantillon.

2

Chaque manchon en papier contient deux écouvillons. Au total, quatre écouvillons doivent être prélevés. Ouvrez l'une des enveloppes et retirez un écouvillon à la fois. Conservez le manchon en papier pour retourner l'écouvillon après le prélèvement.

3

Avalez pour éliminer l'excès de salive. En effectuant un mouvement circulaire, frottez l'écouvillon à l'intérieur d'une joue environ 20 fois, en exerçant une pression suffisante pour pousser la joue vers l'extérieur.

4

Agitez doucement l'écouvillon dans l'air pour le sécher pendant 3 minutes. Remplacez ensuite l'écouvillon dans le manchon et retirez le deuxième écouvillon du même manchon.

5

Répétez les étapes 4 et 5 en utilisant le même côté de la joue.


6

Ouvrez le deuxième manchon et répétez le même processus en utilisant l'autre côté de la joue pour ces deux écouvillons.

## Préparation de l'emballage

1

Placez les deux manchons contenant les écouvillons secs dans l'enveloppe de retour du prélèvement par écouvillon et scellez.

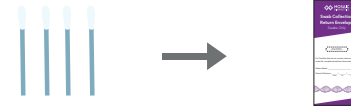

2

Placez l'enveloppe de retour du prélèvement par écouvillon avec les écouvillons secs et le formulaire de consentement éclairé rempli dans le sachet de laboratoire (ou l'emballage à bulles violet) et scellez.



3

Trouvez la carte d'instructions relatives à l'expédition incluse dans votre trousse d'épreuve pour obtenir des détails sur la manière d'expédier votre ou vos prélèvements.

## Avez-vous des questions?

Si vous avez des questions concernant un aspect quelconque du prélèvement d'échantillon ou du processus d'expédition, n'hésitez pas à communiquer avec nous :



**Téléphone** Notre sympathique équipe du Service à la clientèle est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, HNC au 800 288-0383



**Courriel** [CustomerService@MosaicDX.com](mailto:CustomerService@MosaicDX.com)