

担当医師から本検査の実施依頼があったのは、便中の元素分析が有害金属の蓄積リスクに関する間接的な情報を提供するからです。多くの有害金属において、便中への排泄は体外へ排出される第一の自然な経路となります。また便中元素分析は、有害金属への食事摂取量を直接的に示す指標ともなります。モザイク・ダイアグノスティクスは、この次のステップをお手伝いいたします。

検査キットの内容物

まず、検査キットに含まれる以下の部品を確認してください。

部品が不足している場合や期限切れの部品がある場合は、モザイクカスタマーサービス（800-288-0383）までご連絡ください。



オンラインでの検体採取手順の説明書については、QRコードをご利用いただくか、mosaicdx.com/instructions をご覧ください。



検体採取開始前に

特別な食事制限はございません。バリウム造影剤を使用した消化管 (GI) 検査、または歯科用アマルガム (銀歯) の装着・除去から3日以内に検体をご採取にならないようお願いいたします。歯科用アマルガムをお持ちの場合は、透明なバイオハザード用ジップロック袋に貼付されているシールにその旨をご記入ください。

検体採取の手順

1

バーコードシールおよび検体容器に、患者様のお名前、生年月日、採取日の情報を全てご記入ください。バーコードシールは検体容器に貼り付け、容器に記入された情報が確認できる状態にしてください。ボールペンの青または黒インクをご使用ください。フェルトペンやホワイトボードマーカーはご使用にならないようお願いいたします。注意：ラベルのない検体は受理できません。

2

同梱の手袋を着用し、採取トレイに便のサンプルを採取してください。尿や水がサンプルに触れないようにご注意ください。

3

付属のスプーンを使用し、検体の異なる部位から複数箇所を採取し、バイアルに追加してください。検体が目盛り線に達することを確認し、キャップを完全に締め、約30秒間よく振ってください。発送の準備が整うまで冷蔵庫に保管してください。

1




+

2



+

3

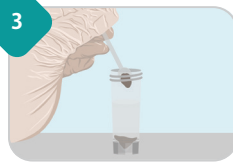

梱包の準備


1

バイアルにラベルを貼り、しっかりと密封してください。バイアルをプラスチック製のバイオハザード袋に入れてください。吸収性梱包シートを追加し、密封してください。



2

密封したバイオハザード用ジップロック袋を検査キット箱に入れてください。

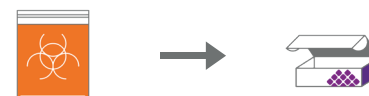

3

検査キットの箱を配送用ラボラトリーパックに入れてください。



配送方法の詳細については、配送指示カードをご確認ください。

ご質問はありますか？

検体採取や発送方法に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください：



電話：当社カスタマーサービス：月曜日から金曜日まで（中部標準時 [CST] 午前8時～午後5時）、800-288-0383 にてお電話を受け付けております。



Email | CustomerService@MosaicDX.com

配送方法の詳細については、配送指示カードをご確認ください。

検査結果は、検体がモザイク・ダイアグノスティックスに到着してから2～3週間以内に、担当の医療従事者へ送付されます。結果の確認、懸念事項の特定、および適切な次の対応については、担当の医療従事者が患者様と直接ご説明・ご相談いたします。なお、モザイク・ダイアグノスティックスの担当者は、患者様またはご家族の方と検査結果について直接お話しすることはできません。